

SHERAPORAL

ISTRUZIONI D'USO

Indicazione:

SHERAPORAL è un induritore ad immersione a base biologica. Non contiene solventi organici e non sviluppa vapori nocivi. **SHERAPORAL** è atossico e può essere smaltito facilmente.

Campo d'applicazione:

Adatto a tutti i rivestimenti per scheletrati.

Uso con rivestimenti per scheletrati:

Versare **SHERAPORAL** in un recipiente di plastica o vetro (con coperchio).
Asciugare il modello in rivestimento in forno per 20 min. a 170 – 180°C.

Da osservare assolutamente:

Il modello deve essere ben asciutto. Immergerlo per ca. 2 secondi nell'induritore liquido SheraPoral. Posizionare il modello in verticale e lasciare asciugare.

Se il liquido indurente non è penetrato perfettamente nel modello, rimettere il modello ad asciugare per 5 min. a 170 – 180°C

Dopo l'uso, richiudere il recipiente di immersione.

Scadenza:

Illimitata nella confezione originale chiusa.

Garanzia

La Ditta **SHERA** è certificata ISO 9001 e garantisce la perfetta qualità dei materiali di sua produzione. Queste istruzioni d'uso si basano su esperienze proprie del laboratorio tecnico SHERA. Gli utilizzatori sono unici responsabili della lavorazione del prodotto. Un'eventuale richiesta di danni potrà avvalersi esclusivamente del valore del prodotto stesso.

Cod. art.926401 / 926402