

SHERA CRYSTAL

ISTRUZIONI D'USO

Descrizione

Elastomero siliconico (polivinilsilossano) a due componenti. Indurimento a temperatura ambiente mediante polimerizzazione, specificatamente formulato per la fabbricazione di mascherine di precisione in odontotecnica.

Indicazioni

Shera CRYSTAL è indicato per la realizzazione di mascherine trasparenti per:

- stampaggio di materiali foto indurenti
- tecnica di stampaggio fibre
- stampaggio e fissaggio di faccette
- produzione di denti in protesi combinata
- realizzazione di monconi individualizzati estetici su impianti

Controindicazioni

Attualmente non note

Effetti collaterali

Attualmente non noti

Lavorazione

Togliere il tappo dalla cartuccia ed applicare il puntale mixer (vedi confezione), quindi inserire la cartuccia nel dispenser rapp. 1:1.

Il dosaggio di base e catalizzatore in rapporto 1:1 (volume o peso) e la miscelazione avvengono automaticamente spingendo i due componenti attraverso il puntale della cartuccia.

L'estrusione del materiale deve avvenire in maniera uniforme e continuativa fino al completamento del manufatto.

Il puntale mixer funge da tappo fino alla successiva lavorazione. Per ogni applicazione usare un puntale nuovo.

Tempo di lavorazione : 2 minuti

Tempo di polimerizzazione: 15 minuti

Tempi calcolati con lavorazione a temperatura ambiente (23°C/73°F). Temperature elevate accelerano la polimerizzazione; temperature più basse rallentano la polimerizzazione.

Confezionamento

Shera CRYSTAL polivinilsilossano conf. Contenente:

nr. 2 cartucce da 50 ml

nr. 10 mixer

Ricambi singoli

Mixer conf. 50 p.

Dispenser automix rap. 1:1

Avvertenze

Il puntale di miscelazione funge da tappo fino alla successiva lavorazione. Per ogni applicazione usare un puntale nuovo.

Sostanze contenenti Sali di metalli pesanti, idrocarburi, catalizzatori per resine epossidiche, ammine, zolfo e derivati, possono inibire la polimerizzazione.

Conservazione

Il prodotto è stato sviluppato per l'impiego nel campo dentale e deve essere utilizzato secondo le istruzioni d'uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da diverso o inadeguato utilizzo.

L'utente è tenuto a controllare personalmente l'idoneità del prodotto per gli impieghi da Lui previsti, soprattutto, se questi impieghi non sono previsti nelle istruzioni d'uso.

Cod. art. 960201