

SHERAFINISH

ISTRUZIONI D'USO

Istruzioni generali

Per la pulizia della protesi, elimina i residui monometrici, rende la superficie liscia e lucida. Lascia un gradevole profumo. Dermatologicamente testato.

Applicazione

Vaporizzare sulla protesi ad una distanza di ca. 15 cm, lasciare asciugare qualche secondo e lucidare con una spazzola asciutta e morbida.

Contiene: n-butan

Avvertenze

Proteggere dai raggi solari, e da fonti di calore, non depositare in luoghi con temperature superiori ai 50° C.

Anche dopo l'utilizzo non forare o bruciare la bomboletta, non spruzzare su fiamme o materiale incandescente.

Tenere fuori la portata dei bambini.

Garanzia

La Ditta SHERA è certificata ISO 9001. L'elaborato sistema di controllo della qualità garantisce la perfetta qualità dei prodotti. Le istruzioni d'uso si basano sui valori indicativi elaborati nel laboratorio tecnico SHERA. Per ottenere risultati positivi è assolutamente necessario seguire le istruzioni riportate. Gli utilizzatori sono unici responsabili della lavorazione del prodotto. Un'eventuale richiesta di danni potrà avvalersi esclusivamente del valore del prodotto stesso.

Cod. art. 990101