

# **SHERAORTHOMER**

---

## **ISTRUZIONI D'USO**

---

Resina polimerizzante a freddo a base di metilmetacrilato, per la realizzazione di apparecchi ortodontici. Come da legge sanitaria da prodotti MPG, Classe 2° relativa alle protesi dentali fisse e mobili.

Particolarmente indicata per il metodo a spruzzo o ad impasto. Ottima stabilità, sufficiente tempo di lavorazione, polimerizzazione veloce.

### **Metodo a spruzzo**

Bagnare bene il modello in gesso e isolarlo. Cospargere il modello della polvere e inumidirlo con il liquido. Quando il liquido è perfettamente assorbito, applicare il prossimo strato etc.

Prima di inserire la placca preformata, inumidire la superficie nuovamente con il liquido.

### **Metodo ad impasto**

Bagnare il modello in gesso e isolarlo. Per l'impasto di resina miscelare 10 parti di polvere con 5 parti di liquido. Tempo di lavorazione: 10 – 15 minuti.

### **Polimerizzazione**

Polimerizzazione nella pentola a pressione.

Tempo: 10 minuti  
Temperatura: 37 – 45°C  
Pressione: 2 – 4 bar.

### **Isolamento**

Elementi in gesso che vengono a contatto con la resina vanno prima isolati. L'isolante alginico deve essere perfettamente asciutto prima di procedere con l'applicazione della resina.

### **Indicazioni di stoccaggio e di sicurezza**

Osservare la data di scadenza. Non conservare a temperature superiori i 25°C. Conservare al riparo dalla luce diretta del sole. Dopo l'uso richiudere sempre bene i contenitori e tenerli fuori dalla portata dei bambini. Il monomero è facilmente infiammabile, irrita gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Possibile sensibilizzazione a contatto con la pelle. Conservare in contenitori ben chiusi in luogo sicuro. Non inalare i vapori del prodotto. Tenere lontano da fiamme e scintille – non fumare. Non scaricare nelle fognature. I contenitori perfettamente svuotati e puliti possono essere riciclati. I residui vanno smaltiti come rifiuti speciali in conformità con le disposizioni amministrative locali.

### **Garanzia**

La Ditta SHERA è certificata ISO 9001. L'elaborato sistema di controllo della qualità garantisce la perfetta qualità dei prodotti. Le istruzioni d'uso si basano sui valori indicativi elaborati nel laboratorio tecnico SHERA che possono essere garantiti solo se l'utilizzatore segue esattamente le istruzioni riportate. Gli utilizzatori sono unici responsabili della lavorazione del prodotto. Un'eventuale richiesta di danni potrà avvalersi esclusivamente del valore del prodotto stesso.

Cod. art. 504010