

SHERASEPAL-U

ISTRUZIONI D'USO

Isolante universale incolore

Isola quasi tutti i materiali utilizzati nell'odontotecnica.

Attenzione: non isola gesso-cera, gesso –resina (polimerizzante a caldo)

Istruzioni d'uso:

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare lentamente e uniformemente uno strato sottile da una distanza di 20-30 cm.

Contiene: cere e gas propellente

N.B.: **SHERA** garantisce la qualità dei materiali di sua produzione.
Queste istruzioni d'uso si basano su esperienze proprie del laboratorio tecnico SHERA.
Gli utilizzatori sono unici responsabili della lavorazione del prodotto. Un'eventuale richiesta di danni potrà avvalersi esclusivamente del valore del prodotto stesso.

Cod. art. 701055 / 701056