

SHERATRAY

ISTRUZIONI D'USO

Polvere di resina polimerizzante a freddo (polimetilmetacrilato) e liquido monomero per la realizzazione di cucchiai individuali per impronte.

Rapporto di miscelazione:

ca. 4 parti di polvere e una parte liquido

Con SHERA-TRAY blu trasparente:

2,5 parti di polvere con 1 parte di liquido.

Importante:

Per ottenere un impasto omogeneo, versare prima il liquido nella ciotola, quindi aggiungere la polvere finché tutto il liquido sia stato assorbito. Spatolare bene. Il materiale è subito pronto per l'uso. Si possono ottenere buoni risultati anche usando la pentola a pressione.

Tempo di indurimento:

ca. 10 minuti

Attenzione:

La polvere ed il liquido vanno conservati a temperatura ambiente.

Garanzia

La Ditta **SHERA** è certificata ISO 9001 e garantisce la perfetta qualità dei materiali di sua produzione. Queste istruzioni d'uso si basano su esperienze proprie del laboratorio tecnico SHERA. Gli utilizzatori sono unici responsabili della lavorazione del prodotto. Un'eventuale richiesta di danni potrà avvalersi esclusivamente del valore del prodotto stesso.

Cod. art. 505010 / 505030 / 505040 / 505050