

Istruzioni per l'uso**DEWA MULTISIL ELASTIC 50 SH****CE****DESCRIZIONE**

Elastomero silconico (polivinilsilossano) a due componenti. Indurimento a temperatura ambiente mediante poliaddizione, specificatamente formulato per la presa di impronta in odontoiatria.

INDICAZIONI

Polivinilsilossano indicato sia nella tecnica classica, che nella tecnica mono impronta tecnica della doppia impronta o tecnica sandwich come massa base.

PARTICOLARITA'

- Impasto soffice, non comprime la mucosa
- Tempi di polimerizzazione ideali per le seconde impronte
- Ideale durezza ed elasticità finale.

CONTROINDICAZIONI

Attualmente non note

EFFETTI COLLATERALI

Attualmente non noti. Atossico.

LAVORAZIONE**Monofase**

- 1) Miscelare 1:1 base+catalizzatore per 30 sec., inserire il putty sul portaimpronta
- 2) Posizionare le seconde impronte direttamente in bocca o sulle preparazioni che interessano o direttamente sopra la massa base MULTISIL ELASTIC.
- 3) Inserire il porta impronta in bocca, estrarlo dopo i tempi consigliati
Si ottiene una mono impronta a due materiali.

Dati tecnici:

Tempo di miscelazione: 30 sec.

Tempo di permanenza nel cavo orale: 2,5 minuti

Retrazione lineare: < 0,2 %

Recupero elastico: 99,4 %

Durezza dopo 24 h: 52 Sh.A

Colore A : bianco

Colore B: lilla

Tempi calcolati con lavorazione a temperatura ambiente (23°C / 73° F). Temperature elevate accelerano la polimerizzazione; temperature più basse rallentano la polimerizzazione.

CONFEZIONAMENTO

DEWA MULTISIL ELASTIC contenente:

nr. 2 barattoli da 500 g

AVVERTENZE

Non impastare i siliconi con guanti in lattice (alterano la polimerizzazione), Non invertire i tappi e non variare il rapporto di miscelazione (1:1)

Tutti i siliconi per addizione non devono essere colati prima di 24 h.

Non mettere a contatto con metalli pesanti, idrocarburi, catalizzatori per resine epossidiche, ammine, zolfo: inibiscono la polimerizzazione.

CONSERVAZIONE

12-28 C° / 54-82 F°

Il prodotto è stato sviluppato per l'impiego nel campo dentale e deve essere utilizzato secondo le istruzioni d'uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da diverso e inadeguato utilizzo. L'utente è tenuto a controllare personalmente l'idoneità del prodotto per gli impieghi da lui previsti, soprattutto se questi impieghi non sono previsti nelle istruzioni d'uso.

CODICE PRODOTTO

DW00550



Distribuito da:

- Via Giotto 21 – 39100 Bolzano - Tel. 0471-052530 fax 0471-052529 - e-mail: info@dewasrl.it